




Zasady korzystania z AED w 8 krokach



Krok 1 – Sprawdź oznaki obecności krążenia. Jeśli u poszkodowanego stwierdziłeś brak oznak obecności krążenia (nieprzytomność, brak oddechu, brak reakcji na bodźce) poproś kogoś o wezwanie pomocy na numer alarmowy 112 oraz o dostarczenie AED. Bezwzględnie rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową do czasu podłączenia AED.

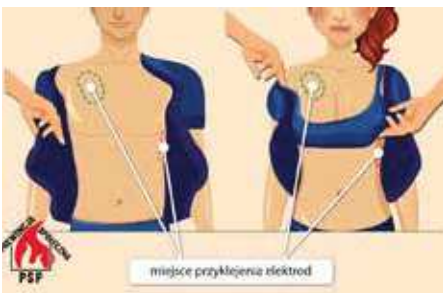

Krok 2 – Odśłoń klatkę piersiową w celu uwidocznienia miejsc przykleśnięcia elektrod. Upewnij się, że klatka piersiowa w miejscu, w którym zostaną umieszczone elektrody jest sucha. Użyj chusteczek, aby wytrzeć nadmiar wilgoci.




Krok 3 – Włącz AED i postępuj zgodnie z instrukcjami głosowymi urządzenia.



Krok 4 – Wybierz wiek poszkodowanego wciskając odpowiedni przycisk:

- dorosły (osoba w wieku powyżej 8 lat),
- dziecko (osoba w wieku pomiędzy 1- 8 lat).

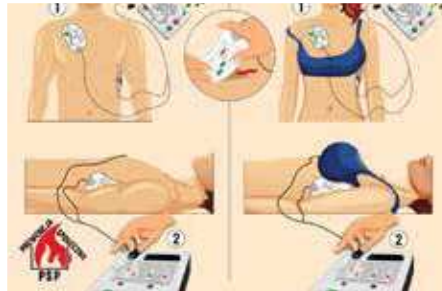

Krok 5 – Przyklej elektrody AED. Odklej spód każdej elektrody i przyklej zgodnie z obrazkiem na piktogramie. Podłącz wtyczkę elektrod do urządzenia.



Krok 6 – Analiza rytmu serca. Na tym etapie należy poczekać, aż AED zakończy analizę. W trakcie analizy nie wolno dotykać poszkodowanego!



Krok 7 – Wstrząs. Jeśli usłyszysz komunikat: „Wylądowanie elektryczne wskazane”, odsuń się od poszkodowanego, nie dotykaj poszkodowanego. Wciśnij przycisk „WSTRZAŚ”.



Krok 8 – Kontynuuj resuscytację krążeniowo-oddechową. Jeśli usłyszysz komunikat: „Wylądowanie elektryczne jest niewskazane”, natychmiast rozpocznij uciskanie klatki piersiowej (tempo uciskania zgodnie z sygnałami dźwiękowymi wydawanymi przez AED). Nie usuwaj elektrod z klatki piersiowej. Urządzenie automatycznie analizuje rytm serca i poinformuje Cię o dalszych krokach.